

COLPOCITOLOGIA HORMONAL, SERIADA, [cód. 11740]

## INFORMAÇÕES GERAIS

### NOME DO EXAME

Colpocitologia Hormonal, seriada

### OUTROS NOMES DO EXAME

Colpocitologia Hormonal, seriada; Citologia Hormonal; Citologia funcional seriada; Colpocitologia funcional seriada; Papanicolaou seriada

### DESCRIÇÃO

### UTILIDADE DO EXAME

### NECESSIDADE DE PEDIDO MÉDICO

O pedido médico deve ser enviado juntamente com a amostra.

### COBERTURA OPERADORA PLANO DE SAÚDE

A maioria da Operadoras de Planos de Saúde dão cobertura a este exame.

### PREPARAÇÃO DA PACIENTE

Nas 48 horas anteriores ao exame, não usar creme e/ou óvulo vaginal, utilizar ducha nem fazer lavagem interna. Não realizar exame ginecológico com toque, ultrassonografia transvaginal e/ou ressonância magnética da pelve. Não manter relações sexuais, com ou sem uso de preservativos.

### AMOSTRA

### AMOSTRA

Secreção cérvico-vaginal. Enviar as lâminas já colhidas e fixadas junto com pedido de exame, histórico clínico e com as datas das coletas.

### INSTRUÇÕES DE COLETA E ARMAZENAMENTO DA AMOSTRA

A Genoa/LPCM fornece o “kit de coleta” necessário para a coleta da amostra cérvico-vaginal. Este kit contém frasco com líquido conservante, escovinha cervical, espátula, espéculo siliconado, e envelope/pedido médico

A coleta da secreção cérvico-vaginal deve ser realizada durante o exame ginecológico em um ambiente de assistência médica. Este kit não deve ser utilizado para autocoleta.

### ESTABILIDADE DA AMOSTRA

As células colhidas e armazenadas no líquido conservante são estáveis à temperatura ambiente por até 42 dias.

### VOLUME MÍNIMO DA AMOSTRA

O frasco fornecido contém 18 ml de solução conservante e pode ser utilizado para análise citológica e

pesquisa de agentes infecciosos.

## RETENÇÃO DA AMOSTRA

A retenção da amostra pelo laboratório é de 90 dias.

## METODOLOGIA

### DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA

Os esfregaços são corados pela coloração de Shorr para avaliação hormonal e pela técnica de Papanicolaou para pesquisa de células neoplásicas.

### INTERPRETAÇÃO CLÍNICA

### RESULTADO E INTERPRETAÇÃO

A avaliação citológica hormonal é uma estimativa dos hormônios estrógeno e progesterona. Os índices, eosinofílico, cariopícnótico e de maturação, fornecem uma indicação da ação hormonal. Contudo, não há perfeita correlação com os níveis séricos. Processos inflamatórios vaginais, uso de medicamentos como digitálicos e hormônios, podem alterar as maturações celulares.

### DISPONIBILIDADE DO LAUDO (TAT)

O laudo estará disponível 3 a 5 dias úteis após a autorização do exame.

### VALORES DE REFERÊNCIA

É dada uma percentagem dos diferentes tipos de células da mucosa vaginal com avaliação da atividade estrogênica e, quando indicado, avaliação da ação lútea (progestacional, pós ovulação). Adicionalmente é feita a pesquisa de células neoplásicas, análise semelhante ao descrito na colpocitologia oncótica.

### NOTAS

Este exame é desenvolvido e validado nos laboratórios da Genoa/LPCM.